

文件名稱：毒物組檢驗前流程標準作業程序	版次：1
文件編碼：CSHL-SOP(TOX)-050401	附件三

## 毛髮採集注意事項

一、檢體需求量：50 毫克(約 200 根)

二、採檢步驟：(連結 <https://www.youtube.com/watch?v=wqH904m3gEM>)

### 頭髮採檢流程圖

#### 1、長頭髮

以線綁住長髮後，以剪刀從髮根處剪下頭髮。



#### 短頭髮

直接以手抓取後，以剪刀從髮根處剪下頭髮。



2、頭髮從髮根處剪取下來，放置錫箔紙上，並標註頭皮端。



標註“頭皮端”

3、鋁箔紙先折三分之一蓋住頭髮，剩下的鋁箔紙再折過去包覆。



4、把頭髮放入信封中，並且黏上封籤。



5、恭喜你，完成頭髮採檢。

- 三、分析長度：近頭皮端的四公分（最近三個月）。
- 四、檢驗項目：包括有安非他命類藥物（安非他命、甲基安非他命、MDA、MDMA）、鴉片類藥物（海洛因、Morphine、Codeine）、愷他命（Ketamine）。
- 五、檢驗費用：每一區段（三個月）2000 元。
- 六、毛髮檢驗目前國內尚未實施認證，檢驗報告僅供毒品防護參考。
- 七、繳款方式：
1. 以掛號方式寄送(建議採用宅急便寄送)。
  2. 現金袋。
  3. 匯款方式：
    - 戶名：中山醫學大學附設醫院中港分院
    - 帳號：中國信託台中分行 026538366601 銀行代號：822
    - ※ 以 ATM 轉帳者，請於申請表註明轉帳末五碼。
    - ※ 匯款後請來電確認或註明匯款人。
- 八、檢驗時間：每個月 1 日及 15 日。
- 九、檢驗天數：4 個星期。
- 十、聯絡方式：
- 檢驗單位：檢驗科 藥物檢測中心
- 電話：04-24739595 分機 32253、32255
- 傳真：04-24717441
- 地址：台中市南區建國北路一段 110 號
- 十一、檢驗科 藥物檢測中心網址：  
<http://w2.csh.org.tw/web/B32100/>
- 十二、寄出前請再次確認：

### -----採檢查核表

項目	自行查核
1.檢體數量足夠(大於 200 根)	<input type="checkbox"/>
2.用錫箔紙包好的毛髮檢體	<input type="checkbox"/>
3.完成毛髮檢驗申請表	<input type="checkbox"/>
4.檢驗費用(每區段 2000 元)	<input type="checkbox"/>
5.掛號寄出	<input type="checkbox"/>